

HET HEGENBERGER SPECULUM


We helpen verloskundigen, chirurgen, klinisch verloskundigen en verloskundigen over de hele wereld om het gemak, de snelheid en de kwaliteit van post-partum hechten te verbeteren!

Met een revolutionair hulpmiddel, dat een duidelijk en onbelemmerd zicht en toegang biedt terwijl de gebruiker de handen vrij heeft om te hechten.

Dit bespaart tijd, vermindert extra hulp van collega's en kosten. En het zorgt voor een betere algehele patiëntervaring.



**OPTIMALE EXPOSURE
VAN DE RUPTUUR**

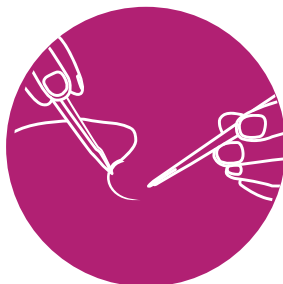

SNELLER HECHTEN




BETERE ERGONOMIE


VOOR MEER INFORMATIE:

MD MEDICAL
BENELUX DYNAMICS

Wijde Wade 1a • 3439 NP Nieuwegein • The Netherlands
T +31(0)30 285 11 05 • F +31(0)30 285 11 06
E info@medicaldynamics.nl • www.medicaldynamics.nl

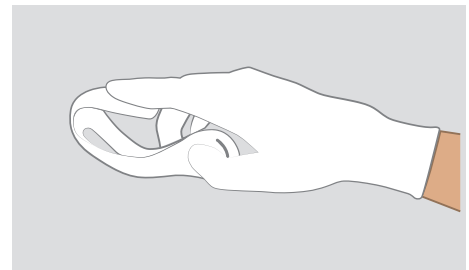


Houd het speculum vast zoals weergegeven in de afbeelding

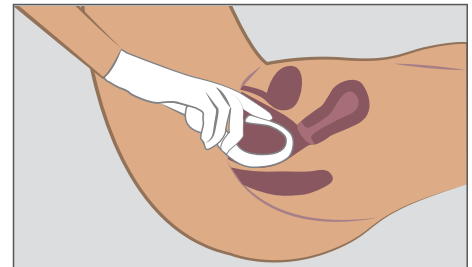


Houd de zijkanten van het speculum samen-
gedrukt terwijl u het in de vagina inbrengt.


Gebruik geen glijmiddel

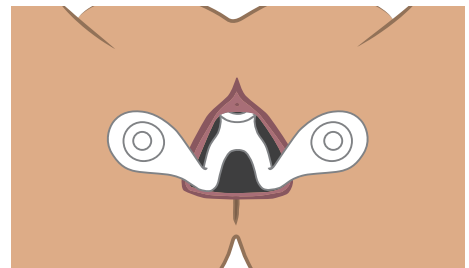

De juiste plaatsing wordt in deze afbeelding
getoond. **Zorg ervoor dat het speculum
niet verder naar binnen wordt geplaatst
dan in deze afbeelding wordt weergege-
ven!**

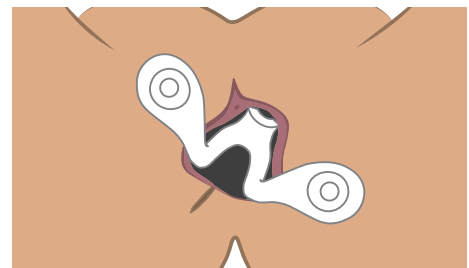

Het speculum kan worden geplaatst voor
perineum rupturen en na episiotomieën.

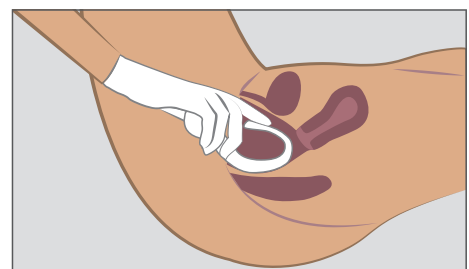

Om het speculum te verwijderen: druk
voorzichtig de zijkanten van het speculum
tegen elkaar en gebruik uw wijsvinger om
ervoor te zorgen dat het bovenste deel
van het speculum van de baarmoederhals.
Druk op het bovenste gedeelte en trek het
speculum voorzichtig uit de vagina.

HEGENBERGER SPECULUM



VERBETER HET POST-PARTUM HECHTEN!

- Gemaakt om de kwaliteit van het hechten te verbeteren
- Zeer goede exposure van perineum trauma
- Minder stress en pijn voor de patiënt
- Hechten gaat sneller
- Geen collega nodig om te helpen
- Betere trainingsmogelijkheden
- Vermindert het risico op prikincidenten