


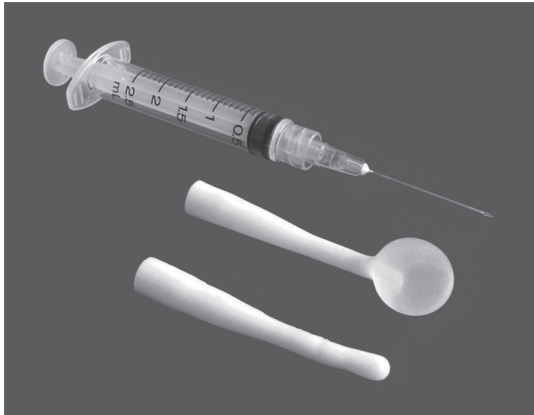

MD Word/Bartholin-katheter

Productnr: 600130

Let op

1. Volgens de federale wetgeving van de VS mag dit instrument uitsluitend aan een arts worden verkocht.
2. Het instrument mag niet opnieuw worden gebruikt, om te voorkomen dat de gebruiker geïnfecteerd raakt door het micro-organisme.

Indicaties

De MD Word/Bartholin-katheter wordt gebruikt bij de behandeling van abscessen en cysten aan de klieren van Bartholin.

Waarschuwingen

1. Pomp de ballon altijd op met een steriele zoutoplossing. Pomp de ballon nooit op met lucht, kooldioxide of een ander gas.
2. Gebruik geen zalf of glijmiddel op oliebasis, aangezien dit de siliconen kan beschadigen, waardoor de ballon kan barsten.
3. Het maximale oppompvolume van 3 ml mag niet worden overschreden. Als er overmatige druk wordt uitgeoefend om de ballon van dit instrument op te pompen, kan de ballon knappen.
4. Houd rekening met onderliggende maligniteit bij vrouwen die ouder zijn dan 40 jaar en bij wie zich cysten of abscessen in de klieren van Bartholin voordoen.
5. De duur van epithelialisatie kan per patiënt verschillen. De opgepompte katheter is niet bedoeld om langer dan 28 dagen in het lichaam van de patiënt achter te blijven.

MD Word/Bartholin-katheter

Medical Dynamics

Wijde Wade 9

3439 NP Nieuwegein

The Netherlands

T +31(0)30 285 11 05

F +31(0)30 285 11 06

info@medicaldynamics.nl

www.medicaldynamics.nl



Wellkang Ltd (www.CE-marking.eu)

29 Harley St., Londen W1G 9QR, VK

Niet gemaakt met natuurlijk rubberlatex

Gebruiksaanwijzing

1. Maak een incisie in de buitenwand van de cyste om het abces te draineren.
2. Nadat het abces is gedraïneerd, brengt u de lege siliconen katheter via de incisie in het abces in.
3. Pomp de siliconen katheter in de cysteholte voorzichtig op door met de spuit van 3 cc zoutoplossing in de katheter te spuiten.
4. Het maximale oppompvolume (3 ml) mag niet worden overschreden. Zodra de katheter is opgepompt, verwijdt u de spuit en naald en laat u de zelfafsluitende, met zoutoplossing opgepompte Word/Bartholin-katheter achter in het abces.
5. Nadat epithelialisatie van een nieuwe opening heeft plaatsgevonden, kunnen de zoutoplossing en katheter uit de cyste worden verwijderd.
6. Verberg het vrije uiteinde van de katheter in de vagina. Nadat de katheter is verwijderd, zal het abces gewoonlijk krimpen en volledig genezen, zodat de klieren van Bartholin weer normaal kunnen functioneren.



Panpac Medical Corporation

6F-2, No. 202, Sec. 3, Ta-Tong Road,

Shi-Chih District, New Taipei City, Taiwan.



NIET OPNIEUW GEBRUIKEN



FABRIKANT



UITERSTE GEBRUIKSDATUM



PARTIJCODE



GESTERILISEERD MET ETHYLEENOXIDE